



# Erste Schritte der Fernanpassung

## Aktivierung der Ferneinstellung<sup>\*</sup>


In 3 einfachen Schritten sind Sie bereit für die Nutzung der Fernanpassung Ihrer Hörgeräte.

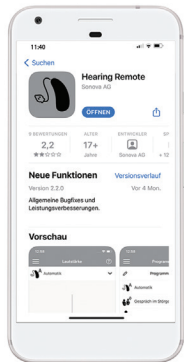

1. Laden Sie die Hearing Remote App herunter.

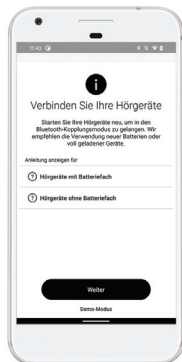

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Hörgeräte zu koppeln.

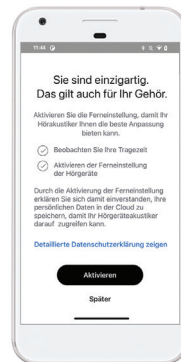

3. Aktivieren Sie die Ferneinstellung gemäß den Eingabeaufforderungen der App.

Für die Verwendung der Hearing Remote App sind Unitron Hörgeräte mit Bluetooth<sup>®</sup>-Verbindung erforderlich. Die Remote Plus App funktioniert auf Apple Smartphones mit iOS<sup>®</sup> 12 oder aktueller und Android<sup>™</sup>-Smartphones ab Version 7. Das App Store-Logo ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

<sup>\*</sup>Ihr Hörakustiker muss die Ferneinstellung während Ihres Besuchs aktivieren und Sie müssen die Ferneinstellung in der Hearing Remote App aktivieren, um sie nutzen zu können.

# Anpassung Ihrer Hörgeräte

Übernehmen Sie Fernanpassungen von Ihrem Hörakustiker in 3 einfachen Schritten.



1. Sie erhalten eine individuell auf Sie zugeschnittene Nachricht von Ihrem Hörakustiker.



2. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um auf die Anpassung zuzugreifen, oder öffnen Sie die Hearing Remote App und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Meine Hörgeräte** > **Hörgeräte-Anpassungen**.



3. Wählen Sie die Anpassung aus und übernehmen Sie die Änderungen.

Hinweis: Der neue Klang gefällt Ihnen nicht? Die ursprünglichen Einstellungen lassen sich im Handumdrehen wiederherstellen.